

Garantie 100% sur trois ans

Perspectis, Inc. (« Perspectis ») garantit, sujet aux conditions énumérés ci-dessous, que si ce produit est défectueux n'importe quand au cours de la période spécifique de garantie, Perspectis réparera ou remplacera le dit produit par le dernier modèle sans aucun frais pour les pièces ou tout travail. Des frais d'expédition peuvent s'appliquer. La période de garantie est de TROIS ans à partir de la date de l'achat original au détail.

CONDITIONS

1. **Enregistrement** : La fiche de garantie ci-jointe doit être soumise à Perspectis au cours des quarante-cinq (45) jours suivant la date de l'achat original.
2. **Preuve de la date d'achat** : Cette garantie s'applique au produit à partir de la date de l'achat original au détail. Par conséquent, le propriétaire doit fournir la preuve de l'achat original, si la fiche de garantie n'est pas retournée.
3. **Abus, réparations non autorisés, etc.** : L'unité ne doit pas avoir été changée, modifiée ou réparée. L'unité ne doit pas avoir été sujette à un accident, un abus, une utilisation commerciale, une location ou avoir fonctionné contrairement aux instructions d'utilisation.
4. Cette garantie ne concerne pas l'usage normal et les dommages provoqués par l'abus ou le soin inapproprié, ne couvre pas l'entretien régulier de produit tel que le nettoyage ou le lissage de la surface, et est valide seulement dans le pays où l'unité est achetée à l'origine.
5. **La livraison appropriée** : Le propriétaire doit appeler ou envoyer un email à Perspectis pour autorisation et instructions avant de renvoyer le produit défectueux pour l'inspection de garantie. Tous les retours non autorisés seront refusés ou et renvoyés aux frais du propriétaire. Après avoir reçu l'autorisation et les instructions de la garantie de Perspectis, l'unité défectueuse doit être envoyée, fret payé d'avance, au service indiqué par Perspectis dans son paquet original ou un tout paquet semblable ayant un niveau égal de protection. Le propriétaire doit inclure une note avec son nom, adresse et numéro de téléphone ainsi qu'une description du défaut.

EXCEPTÉ JUSQU'AU DEGRÉ INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, PERSPECTIS, INC. DÉMENT EXPRESSIVEMENT TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, EXPRESSE OU LIMITÉE, ET BIEN QUE SURGISSANT PAR LOI, PAR STATUT, PAR USAGE DE COMMERCE, Y COMPRIS SANS GARANTIES OU ÉTATS IMPLICITES PAR LIMITATION DE QUALITÉ ET DE FORME PHYSIQUE VENDABLE POUR UNE UTILITÉ PARTICULIÈRE. EN AUCUN CAS PERSPECTIS, INC. OU SES FOURNISSEURS OU DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES D'UNE QUANTITÉ PLUS GRANDE QUE LE PRIX D'ACHAT RÉEL DE L'UNITÉ OU DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF, FORTUIT, EXAMPLAIRE, OU N'IMPORTE QUELS DOMMAGES QUELCONQUES, RÉSULTANT DE N'IMPORTE QUELLE UTILISATION DE CE PRODUIT, OU DE TOUTES AUTRES CAUSES, QU'ELLES SOIENT BASÉES SUR LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS, OU AUTREMENT, PROVENANT OU DE QUELQUE FAÇON À L'UTILISATION OU À L'EXÉCUTION DE CE PRODUIT, À L'INCAPACITÉ D'EMPLOYER CE PRODUIT, OU À LA FOURNITURE OU À L'IMPOSSIBILITÉ DE RENDRE DISPONIBLE LEURS PRODUITS, MARCHANDISES, OU SERVICES, MÊME SI CONSEILLÉ SUR LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. ET PERSPECTIS, INC. N'ASSUME NI N'AUTORISE N'IMPORTE QUEL REPRÉSENTANT OU TOUTE AUTRE PERSONNE À ASSUMER POUR LUI UN ENGAGEMENT OU UNE RESPONSABILITÉ AUTRE QUE TEL QU'IL EST EXPRESSIVEMENT DÉTERMINÉ CI-DESSUS. CE PRODUIT EST OFFERT CONDITIONNELLEMENT À L'ACCEPTATION DU CLIENT SANS MODIFICATION DES LIMITATIONS DÉTERMINÉES CI-DESSUS. L'ESSAI ET/OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE TOUTES CES LIMITATIONS.



DR. HAMILTON HALL BELT™

Instructions d'utilisation & Garantie 100% sur trois ans (Doit être lu d'abord)



Clients situés aux États-Unis et au Canada:

Veuillez ne pas entrer en contact avec le lieu de l'achat pour l'aide à la garantie

Appelez gratuitement le 1-855-BodyRyzm pour toutes questions ou services de

BodyRyzm LifeScience / Perspectis, Inc.

1 First Canadian Place, Suite 350

Toronto, ON, Canada, M5X 1C1

www.BodyRyzm.com

Toll free: 1-855-BodyRyzm (263-9799), Tel: 1-416-595-1575

Fax: 1-416-595-6438

Email: CustomerService@BodyRyzm.com



AVERTISSEMENT



- Ce produit n'est pas un jouet. Tout utilisateur a besoin de lire et de comprendre toutes les instructions dans ce document avant d'employer ou d'examiner ce produit.
- Commencez par l'inflation - pas plus de ½ de pouce de l'épaisseur totale d'un *Dr. Hamilton Hall Belt*, particulièrement quand vous commencez tout juste à employer votre ceinture. Le moins d'air, c'est un plus ! Vous pouvez augmenter le niveau de l'inflation selon vos besoins et préférences après plusieurs utilisations.
- Ne sautez pas sur ce produit.
- Ne vous reposez pas ou ne marcher pas sur ce produit.
- N'employez pas ce produit ou ne faites aucun exercice sur ou avec ce produit, si vous avez une douleur aiguë, des dommages corporels, une chirurgie récente, une grossesse ou n'importe quel autre état peu commun. Consultez un conseiller en santé, autorisé et qualifié, (ci-après « conseiller ») si vous avez n'importe quelles questions.
- Employez ce produit seulement en vous allongeant dessus.
- Ce produit est conçu pour des charges de poids jusqu'à 350 livres seulement.
- Gardez ce produit loin de tous les objets pointus, n'importe quels produits chimiques agressifs ou caustiques, et n'importe quelle source de chaleur intense.
- Ajustez l'inflation de ce produit, seulement quand elle est à la température ambiante.
- Veuillez garder le sac d'emballage hors de portée des bébés et des enfants pour éviter tout danger d'étouffement.

COMMENT AJUSTER, ENTRENIER ET DÉPANNEZ ...

Comment ajuster le niveau de l'appui fourni par *Dr. Hamilton Hall Belt*

Vous pouvez le faire facilement et immédiatement en ajustant l'inflation du *Dr. Hamilton Hall Belt*.

- Ouvrez la valve. Gonflez doucement par un soufflement de la bouche ou dégonflez en pressant sur le *Dr. Hamilton Hall Belt* en ajustant le niveau désiré de l'inflation. Veuillez commencer par une inflation légère quand vous commencez à employer votre *Dr. Hamilton Hall Belt*. Le moins d'air, c'est un plus !
- Fermez la valve fermement et appréciez votre *Dr. Hamilton Hall Belt*. Cet ajustement peut être fait en 10-30 secondes.

Comment entretenir votre *Dr. Hamilton Hall Belt*

- Placez une serviette à main au-dessus de votre *Dr. Hamilton Hall Belt* en vous allongeant dessus.
- Rajustez l'inflation du dispositif une fois par semaine si nécessaire.
- Nettoyez votre *Dr. Hamilton Hall Belt* en l'essuyant avec un tissu doux et humidifié à l'eau tiède savonneuse à chaque fois que c'est nécessaire.

COMMENT APPRÉCIER ...

Réduit le mal de dos en fournissant la résistance requise et le soutien sous la colonne lombaire pendant le sommeil



- Gonflez votre *Dr. Hamilton Hall Belt* légèrement et fermez la valve fermement. Veuillez commencer par l'inflation. Vous pouvez augmenter l'inflation selon les vos besoins et préférences après plusieurs nuits d'utilisation. Veuillez noter que le niveau optimum du soutien d'un bon sommeil est habituellement inférieur durant la nuit que le niveau du soutien souvent préféré pendant une période courte de repos.
- Placez-le à plat sur votre lit.
- Allongez-vous doucement sur votre *Dr. Hamilton Hall Belt*. Assurez-vous que votre *Dr. Hamilton Hall Belt* est à travers votre dos inférieur et perpendiculaire à votre corps.
- Il n'y a aucun besoin de faire quoique ce soit de spécial. Allongez-vous simplement dessus. Et votre *Dr. Hamilton Hall Belt* fera le reste.

Réduit le mal de dos en décompressant la colonne lombaire



- Gonflez votre *Dr. Hamilton Hall Belt* légèrement et fermez la valve fermement. Veuillez commencer par l'inflation. Vous pouvez augmenter l'inflation selon les vos besoins et préférences après plusieurs utilisations.
- Placez-le sur une surface plate telle que le lit, le plancher, le sofa, etc.
- Allongez-vous doucement sur votre *Dr. Hamilton Hall Belt*. Assurez-vous que votre *Dr. Hamilton Hall Belt* est à travers votre dos inférieur et perpendiculaire à votre corps.
- Il n'y a aucun besoin de faire quoique ce soit de spécial. Allongez-vous simplement dessus. Et votre *Dr. Hamilton Hall Belt* fera le reste.
- Allongez-vous doucement sur votre *Dr. Hamilton Hall Belt* pendant 20 minutes à la fois, comme nécessaire.